

acryl

Alkoholfreies Schnell-Desinfektionspräparat auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen.

- alkoholfrei
- schnelle und gute Wirksamkeit
- für alkoholempfindliche Flächen
- hervorragende Materialverträglichkeit
- nach EuroNormen geprüft
- Noro-Virus wirksam

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Flächen. Besonders geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen wie z. B. Plexiglas.

arcana® acryl besitzt eine entsprechende Lebensmittelunbedenklichkeitsbescheinigung. Nach entsprechender Einwirkzeit ist ein Abwischen bzw. Abspülen mit klarem Wasser erforderlich.

Anwendungsmethoden / -hinweise

arcana® acryl ist eine gebrauchsfertige Lösung. arcana® acryl unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen. Die gebrauchsfertige Lösung können Sie wahlweise als Sprühdessinfektion oder als Schaum ausbringen. Bitte beachten Sie hierzu unsere Angaben zum Zubehör auf der Rückseite.

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g enthalten an wirksamen Bestandteilen: 0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride; 0,26 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, Chloride

Chemisch-physikalische Daten:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C): ca. 0,998 g/cm³
Temperaturstabilität: -5 °C bis +40 °C
pH-Wert (20 °C): ca. 6,0 – 8,0

Mikrobiologische Wirksamkeit

arcana® acryl wirkt bakterizid, levurozid und gegen einzelne Viren. Auch lebensmittelbereichsspezifische Problemkeime, wie z.B. Campylobakter, EHEC, Salmonellen oder Listerien, werden zuverlässig innerhalb von 1 min. abgetötet.

Wirksamkeit:

Bakterien, Pilze (gem. VAH)	1 min.
ÖGHMP Expertise	1 min.
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HCV, HBV, Influenza)	1 min.
Noro-Virus*	15 min.

*Prüfkeim: Murines Noro-Virus



geprüft nach EN 1276, 1650,
13697, 13624, 13727, 14476



ready-to-use

alkoholfrei

gute Wirksamkeit

schnelle
Einwirkzeiten



acryl

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
1l-Flasche	10 x 1 l	165731

Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
500 ml / 1 l Sprühpumpe	180124
1 l FOAM-Schaumspühpumpe	180123

Besondere Hinweise

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Augenkontakt vermeiden.

Umweltinformationen

Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat arcana® acryl vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.arcana-hygiene.com.

Für Ihre individuellen Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter info@arcana.at

Schülke & Mayr GmbH

Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1- 523 25 01-0
Telefax +43 (0) 1- 523 49 27
info@arcana.at
www.arcana-hygiene.com

Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).