

# rinse cip

## Klarspülkomponente

- sorgt für fleckenfreie Trocknung
- optimale Benetzung des Spülgutes
- materialschonend
- von Miele freigegeben
- zur Spülung nach einer Anlagenreinigung (z.B. in CIP Anlagen) einsetzbar

## Anwendungsgebiete

Flüssiges saures Klarspülmittel nach maschineller Aufbereitung zur Anwendung im letzten Spülgang.

## Anwendungsmethoden / -hinweise

arcana® rinse cip wird im letzten Spülgang zudosiert. arcana® rinse cip wird wie folgt dosiert: Je nach Benetzbarkeit des Materials: 0,1 – 0,5 %, d.h. 1 – 5 g/l Spülflüssigkeit. Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen.

## Produktdaten

### Zusammensetzung:

arcana® rinse cip enthält organische Säuren, nichtionische Tenside, Alkohol-derivate

### Chemisch-physikalische Daten:

Konzentrat:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

pH-Wert: ca. 2,0

Dichte (20 °C): 1,03 g/cm<sup>3</sup>

0,2 %ige Gebrauchslösung:

Aussehen: farblos, klar

pH-Wert (in Leitungswasser): ca. 5,0




**Klarspül-  
komponente**

**CIP-geeignet**

**fleckenfreie  
Trocknung**

**materialschonend**

**gute Benetzung  
des Spülguts**

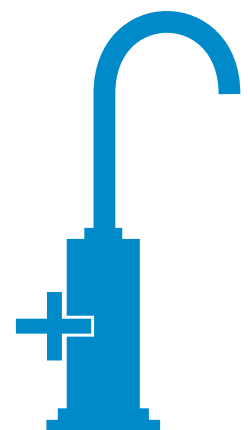

# rinse cip

## Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
5 l-Kanister	1 x 5 l	146633
30 l-Kanister	1 x 30 l	146636

## Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
5 l Kanisterhahn	135501
30 l Kanisterhahn	126101
5 l Kanisterdosierer	117101
30 l Kanisterdosierer	182501
5 l Kanisterschlüssel	135810
30 l Kanisterschlüssel	135901
Messbecher	136101
Umfülltrichter	117901

## Besondere Hinweise

Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.

## Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Xi: Reizend.

R36: Reizt die Augen.

S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat arcana® rinse cip vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter [www.arcana-hygiene.com](http://www.arcana-hygiene.com).

Für Ihre individuellen Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter [info@arcana.at](mailto:info@arcana.at)

### Schülke & Mayr GmbH

Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Telefon +43 (0) 1- 523 25 01-0  
Telefax +43 (0) 1- 523 49 27  
[info@arcana.at](mailto:info@arcana.at)  
[www.arcana-hygiene.com](http://www.arcana-hygiene.com)

### Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

### Schulke Polska Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa / POLAND  
Tel. +48 22 568 22 02-03  
Fax +48 22 568 22 04

Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).